

輸液ライン交換時の 漏れを低減



オートスピロスは 輸液ライン交換時の漏れを低減します。




プライミングキャップ

フィルタ付きのキャップが付いたプライミング用アダプタです。キャップ部分のフィルタは疎水性で、先端が薬液で満たされるまでエアのみ通過します。薬液充填後は、プライミングが自動的にストップします。2重フィルタ構造によりキャップを外す際の薬液の飛散を軽減します。

閉鎖式構造



1. オスコネクタ非接続時、流路は閉鎖状態です。

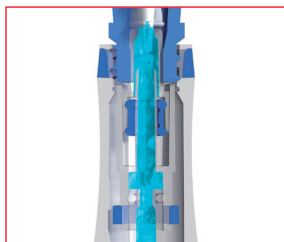

2. ニードルフリーコネクタをはじめとするメスコネクタに接続されてはじめて、流路が開通します。




3. 接続が解除されると、流路は自動的に閉鎖状態となります。これにより薬液の外部露出や飛散を軽減します。


回転機能付きルアーロック機構

一度接続すると外れ難い機構で外れリスクを低減します。また接続後は双方向に回転可能で、輸液ラインのねじれが無くなります。

使用方法

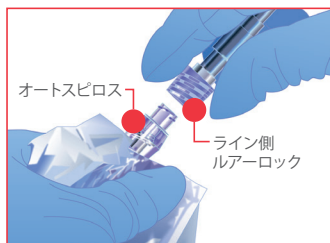


1. ライン先端にオートスピロスを装着します。この時点ではプライミングキャップのふたはOPENのままです。

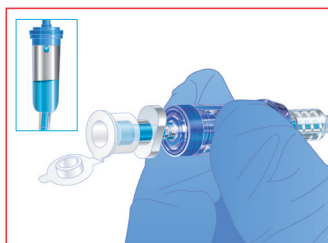

2. 一般的なライン同様、ローラクランプを開放し、プライミングを行います。キャップ先端まで薬液で満たされると、自動的にプライミングは終了します。



3. プライミング後は、ローラクランプを閉じ、直ぐにキャップのふたを閉じます。

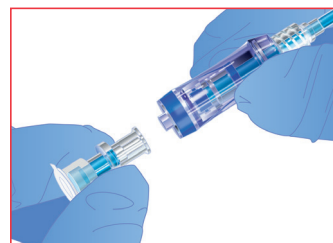

4. プライミングキャップは薬液投与までは外さず、投与時に初めて外します。(本体接続後、プライミングキャップは廃棄します。)

| 品名 | カタログ番号 | 形状 | プライミングボリューム (mL) | 包装単位 |
|---------|------------|----|---------------------------------------|----------|
| オートスピロス | CH2000S-AT | | 本体 0.10 プライミングキャップ 0.13 合計 0.23 | 20個 / 1箱 |

包装：1個毎滅菌済

再使用禁止

一般的な名称：輸液用アクセサリセット
販売名：オートスピロス
医療機器届出番号：09B1X00004000142
クラス分類：I 一般医療機器
製造販売元：フォルテグロウメディカル株式会社

Cardinal HealthTM
Essential to care

cardinalhealth.com

お問い合わせ先
日本コヴィディエン株式会社
TEL 0120-917-205