



誰もが簡単に使えて  
安全な栄養管理ができる  
フィーディングポンプ

# 誰もが簡単に使えて、 スムーズで安全な栄養供給管理 優れた操作性と高い機能を実現

● シンプルなセッティング

● 72時間の投与履歴参照機能

● 15時間のバッテリー駆動時間



本体側面

## Easy eコントロールパネル

画面の指示に従って、画面左の5つのボタンを押すだけで操作できる画期的なコントロール性を実現しました。

### 大型液晶ディスプレイと日本語表示パネル

メッセージが日本語で表示されるので、誰でも簡単にお使い頂けます。



大型液晶ディスプレイ

### 速やかに選べるモード選択

必要最小限の入力作業で作動する「EZポンプモード」をはじめ、各種設定が容易です。



オプション設定画面

### 画面の手順に従って、スムーズ操作

画面の案内に従うだけで、さまざまな入力・設定ができます。



投与調節画面



投与速度設定画面



フラッシュ量設定画面

## Safety 高い安全性

つねに供給管理ができ、万一のトラブル時にも速やかに対処できるように、高い機能性を有しています。



DEHPフリーポンプセット



トラブルによる流出を防ぐ  
アンチフリーフロー

写真のアンチフリーフローバルブにより、フリーフローを防止します。



誤接続防止コネクター

静脈ラインとの誤接続を防止します。  
(医薬発第888号に準拠)




ポンプの上流／下流のフローチェック

eポンプ独自のチェックシステムにより、ポンプの上流および下流の流れを常に監視します。

## ひと目でわかるエラーメッセージ&アラーム機能


トラブルが発生した場合、アラームが作動します。

わかりやすいエラーメッセージとアラーム音によって、ポンプの状態をすぐに把握・対処が可能です。

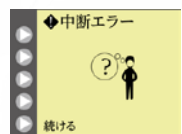


中断エラー

投与中断が10分以上継続した状態

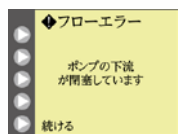


フローエラー

ポンプセット下流のラインが閉塞

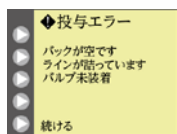


投与エラー

栄養バックが空、ポンプセットの上流ラインが閉塞

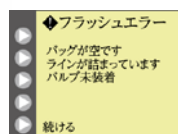


フラッシュエラー

フラッシュバックが空、ポンプセットの上流ラインが閉塞

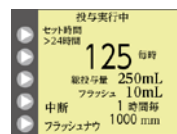


セット使用>24時間

ポンプセット使用が24時間超

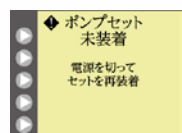

ポンプセット未装着

ポンプセットが未装着、ポンプセットの装着異常

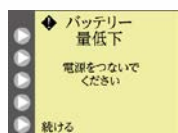


バッテリー量低下

電源をつないでください



ローターエラー

ポンプセットのローターへの装着異常、ローターの動作異常

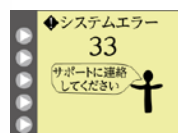

システムエラー

内部回路の異常

## High Performance フィード&フラッシュ機能

栄養投与とともにフラッシュも自動で行える、供給システムがついています。

### 栄養投与とフラッシュを自動コントロール

患者さまの水分補給が計画的に行えます。各々で速度・投与量の設定が可能です。また、従来通りの栄養剤のみの投与も可能です。



# Kangaroo™ カンガルー eポンプ™

## Kangaroo™ カンガルー eポンプ™

製品名	カタログ番号
カンガルー eポンプ	782400
電源コード	382491

## カンガルー eポンプ™ ポンプセット

製品名	カタログ番号
500mL フィードセット	972055
1000mL フィードセット	973656
1000mL フィードセット & 1000mL フラッシュセット	973662
RTHアダプタセット	974655R

包装単位: 30セット/箱

再使用禁止



カタログ番号: 973662



カタログ番号: 973656



カタログ番号: 974655R

## 仕様

ポンプメカニズム	ローラーゼン動式
投与速度設定範囲	1~400mL (1mL/時きざみで設定可)
投与予定量設定範囲	1~3,000mL (1mLきざみで設定可)
ボラス投与量	1~3,000mL (1mLきざみで設定可)
ボラス回数	1~99回
ボラス間隔	1~24時間 (1時間きざみで設定可)
フラッシュ量設定範囲	10~500mL (1mLきざみで設定可)
フラッシュ間隔設定範囲	1~24時間 (1時間きざみで設定可)
精度	設定流量±10%または0.5mL/時 (いずれか大きい方) ※バッグをポンプより46cm高い位置に吊り下げ、室温22℃±2℃の条件下で新しいポンプセットを使用した場合
閉塞圧	最大103kPa (15psi)
寸法	高さ 160mm x 幅 160mm x 奥行き110mm
重量	1.1kg (ボールクランプ付属時 1.2kg)
材質	筐体: ABSポリカーボネート混合 ポンプセットカバー: ポリエステル/ポリカーボネート混合
電源	ACアダプタ (医療用コンセントに接続) を使用
バッテリー	ニッケル水素電池 充電時間: 約8時間 (完全放電時) / 作動時間: 約15時間 (満充電・100mL/時で作動時)
アラーム	・システムエラー・フローエラー・ポンプセット未装着・中断エラー・ローターエラー・投与エラー ・フラッシュエラー・バッテリー量低下・投与完了
ブザー音量	最大音量時、1m離れたところで70dBA以上
使用温度	10~40℃、相対湿度75% (ただし、結露しないこと)
電撃に対する保護の形式	クラスII、内部電源機器
電撃に対する保護の程度による分類	BF形装着部
水の有害な侵入に対する保護の程度による分類	防滴-IPX1

製品規格  
 一般的名称: 経腸栄養用輸液ポンプ  
 販売名: カンガルー eポンプ  
 医療機器承認番号: 21800BZY10168000  
 クラス分類: III 高度管理医療機器  
 特定保守管理医療機器

製品規格  
 一般的名称: ポンプ用経腸栄養注入セット  
 販売名: カンガルー eポンプ ポンプセット  
 医療機器認証番号: 218AABZX00036000  
 クラス分類: II 管理医療機器

  
**Cardinal Health**  
 Essential to care™

[cardinalhealth.com](http://cardinalhealth.com)

お問合せ先  
 日本コヴィディエン株式会社  
 Tel. 0120-917-205